



Innovative Technologie Völp



# HeadSTEP MouthBITE

PRODUKTINFORMATION

[www.it-v.net](http://www.it-v.net)

# WARUM MouthBITE

Während der radiotherapeutischen Behandlung der Kopf-Halsregion ist eine konstante und reproduzierbare Öffnung des Mundes unerlässlich, um eine präzise Bestrahlung zu gewährleisten (und Nebenwirkungen auf ein Minimum zu reduzieren).

Der **MouthBITE** ist ein neuartiges röhrenförmiges Intraoral-Mundstück, mit dem man während der Behandlung durch den Mund atmen kann. Die Geräte bestehen aus einem intraoralen Teil, einem Mittelteil und einer extraoralen, zylindrischen Verlängerung. Es kann zusammen mit thermoplastischen Masken verwendet werden, um den Kopf eines Patienten zu positionieren und zu immobilisieren.

Der **HeadSTEP MouthBITE** ist für mehrere Anwendungen an einem Patienten vorgesehen.

## MouthBITE round



Der intraorale Teil des **MouthBITE round** schränkt die Zungenbewegung ein.

- » intraoraler Teil zur Kompression der Zunge
- » Mulde für Zähne oder Oberkiefer | Unterkiefer
- » anzuwenden unter der thermoplastischen Maske
- » exakte Reproduzierbarkeit der Kopfposition unter der Maske durch dreidimensionalen Rand
- » große Öffnung für eine erleichterte Atmung



## MouthBITE flat

Aufgrund des abgeflachten intraoralen Teils des **MouthBITE flat** muss der Mund nicht so weit geöffnet werden, was den Patientenkomfort erhöht.

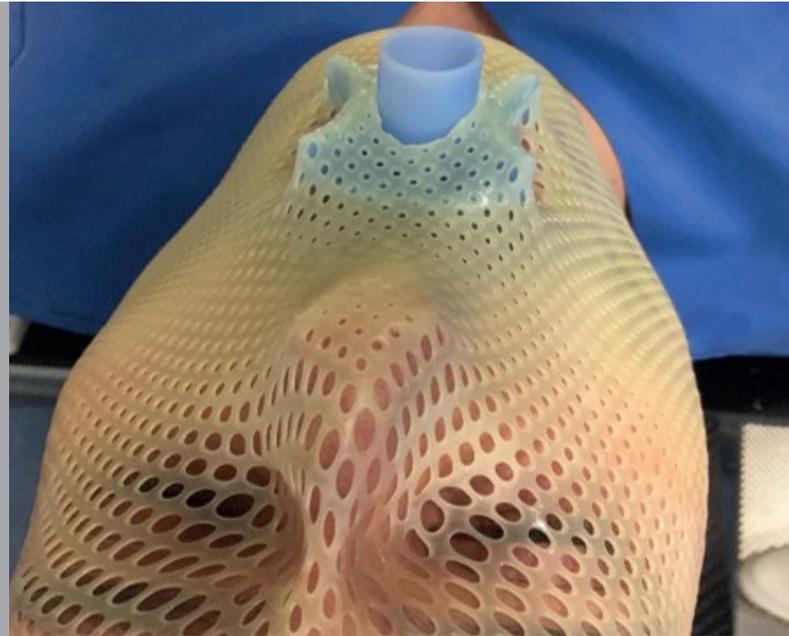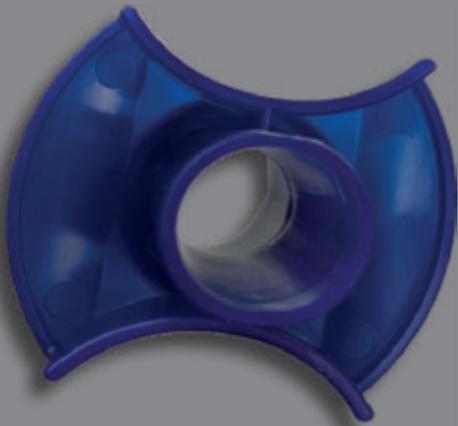

- » flacher intraoraler Teil
- » Mulde für Zähne oder Kiefer
- » anzuwenden unter der thermoplastischen Maske
- » exakte Reproduzierbarkeit der Kopfposition unter der Maske durch dreidimensionalen Rand
- » große Öffnung für eine erleichterte Atmung

### Wie wendet man MouthBITE an:

1. Maske mit Mundloch verwenden
2. Patient **MouthBITE** in den Mund geben
3. Maske wie gewohnt abformen und extraoralen, zylindrischen Teil des **MouthBITE** durch das Mundloch stecken



## **IT-V Innovative Technologie Völp**

Exlgasse 20a  
6020 Innsbruck, Österreich  
T +43 664 411 33 24  
F +43 512 27 75 77  
office@it-v.net  
www.it-v.net

### **Service & Support International | Back-Office**

Elisabeth Entner  
T +43 664 411 33 24  
e.entner@it-v.net

### **Service & Support Deutschland Mitte | Süd | CH**

Boris Jäger  
T +49 151 275 791 99  
b.jaeger@it-v.net

### **Service & Support Deutschland NRW**

Kerstin Grings  
T +49 172 29 83 887  
k.grings@it-v.net

### **Service & Support Deutschland Nord | Ost**

Rudi Schröder  
T +49 171 55 44 690  
r.schroeder@it-v.net

### **Service & Support Deutschland Ost**

Anja Munk  
T +49 172 617 85 12  
a.munk@it-v.net

**www.it-v.net**